



Større frihed med en tynd og formbar bandage

Den nye ALLEVYN Gentle Border Lite er formbar¹ og behagelig for patienten. Den tynde skum giver en optimal fleksibilitet, samtidig med at silikoneklæben minimerer smerte ved bandageskift².

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
LITE
Wound Dressings

tripleaction
technology

ALLEVYN® Gentle Border Lite er en hydrocellulær skumbandage med skånsom silikoneklæb, velegnet til let til moderat væskende sår. Den bløde silikoneklæb er baseret på triple-action teknologien og minimerer smerte hos patienten og traume mod såret ved bandageskift. Bandagen er velegnet til patienter med skrøbelig hud.

Fordele

ALLEVYN Gentle Border Lite giver:

- Større formbarhed som bidrager til en behagelig oplevelse hos patienterne
- Minimal smerte ved bandageskift
- Flexibilitet og kan let formes efter kroppens konturer
- Nem at anvende² – kan løftes og genplaceres uden at miste de klæbende egenskaber²
- Shower-proof (brusebad)³
- Fordelene ved ALLEVYN triple-action teknologi
- Yderst velegnet til patienter med skrøbelig hud²

Indikationer

ALLEVYN Gentle Border Lite er beregnet til behandling af overfladiske, granulerede sår, kroniske og akutte væskende sår, hel- og delhudsskader som: tryksår, diabetiske fodsår, bensår, inficerede sår, cancersår, operationssår, donorsteder, 1 og 2 grads-forbrændinger. Produktet er beregnet til behandling af let til moderat væskende sår.

Applikation

Vælg en passende bandagestørrelse. Forbered og rengør den omkringliggende hud. Fjern beskyttelsespapiret og applicer bandagen med den klæbende side mod huden. Glat bandagen ud hen over såret, mens det resterende beskyttelsespapir fjernes.

Bandageskift

I de tidlige stadier af sårbehandlingen bør ALLEVYN Gentle Border Lite tilses hyppigt. Bandagen kan sidde på i op til 7 dage, afhængigt af eksudatmængde og kliniske retningslinier.

Bandageskift

Løft et hjørne af bandagen og træk det langsomt bagud, indtil bandagen er helt fjernet fra såret.

Forholdsregler

ALLEVYN Gentle Border Lite må ikke anvendes med oxiderende midler som f.eks. hypochloritopløsninger (Eusol eller brintoverilte), da disse kan nedbryde bandagens absorberende polyurethan-komponent. Hvis rødme eller hudreaktion forekommer bør behandlingen med ALLEVYN stoppe og en læge konsulteres.



Produktsortiment		
Varenr.	Størrelse	Pakning
66800833	5cm x 5cm	10
66800834	7.5cm x 7.5cm	10
66800835	10cm x 10cm	10
66800836	5.5cm x 12cm	10
66800837	8cm x 15cm	10
66800840	15cm x 15cm	10

Wound Management
Smith & Nephew
Slotsmarken 14
DK-2970 Hørsholm
Tlf. 45 80 61 00
Fax 45 80 61 51

www.smith-nephew.com/wound
www.allevyn.com

®Trademark of Smith & Nephew
© Smith & Nephew August 2010
23803

Referencer

1. SMTL Report 10/3328/1, Conformability of wound dressings, August 2010.
2. Smith & Nephew Data on File report OR-DOF/001.
3. Smith & Nephew Data on File report OR-DOF/011.

*In one direction