

# Skin X<sup>®</sup>

## Hudbeskyttelsesring og absorbent

Til bandagering af gastrostomier



**Skin X<sup>®</sup> hudbeskyttelsesring og absorbent** er beregnet til brug, når der er udslip fra en gastro-stomi. Der er slidser på dem begge, så de kan sættes på plads rundt om et kateter eller knap.

Skin X<sup>®</sup> hudbeskyttelsesringen er lavet af hydrokolloid, og huden skal være ren og tør ved monteringen. Hudbeskyttelsesringen beskytter den omgivende hud mod lækage. Skin X<sup>®</sup> hudbeskyttelsesringen kan sidde i op til 2-3 dage, afhængigt af lækagemængden. Kontroller bandagen ved stomien ofte og skift efter behov.

Skin X<sup>®</sup> absorbent er lavet i en superabsorbent, der er plastet på ydersiden for at forhindre gennemblødning. Absorbenten placeres ovenpå hudbeskyttelsesringen, så den kan absorbere udslippet og forhindre spredning uden for hudbeskyttelsesringen. Absorbenten skiftes nemmest efter fødeindtagelse eller efter behov.

Varenr.	Skin X <sup>®</sup> hudbeskyttelsesring
203228	Ø 50 mm, Hulstørrelse 3 mm
203229	Ø 50 mm, Hulstørrelse 7 mm
203230	Ø 75 mm, Hulstørrelse 10 mm
203231	Ø 75 mm, Hulstørrelse 15 mm

30 styk i hver pakning

Varenr.	Skin X <sup>®</sup> Absorbent	Absorption
203223	Ø 50 mm, Hulstørrelse 3 mm	8 ml
203225	Ø 50 mm, Hulstørrelse 7 mm	8 ml
203226	Ø 75 mm, Hulstørrelse 10 mm	10 ml
203227	Ø 75 mm, Hulstørrelse 15 mm	10 ml

100 styk i hver pakning